

## Dasher im Click Mode benutzen

### Was ist der Click Mode?

Click Mode ist ein **diskontinuierlicher** Modus. Während in den kontinuierlichen Modi wie Normal Mode, Eye Tracker Mode oder auch One Dimensional Mode Dasher der Bereich rechts vom Cursor fortlaufend zoomt, erfolgt das Zoomen beim Click Mode erst, nachdem der Nutzer durch einen Klick die Position des Cursors bestätigt hat.

Das muss nicht zwangsläufig zu einem Verlust an Geschwindigkeit führen, da gerade bei unsicherer Cursorkontrolle Schreibfehler durch falsches Einzoomen und die dadurch

notwendigen Korrekturen vermieden werden kann.

Der Click Mode ist besonders für Anfänger zu empfehlen, weil hier nicht das Gefühl aufkommt, von Dasher überrannt zu werden.


Er ist aber auch für geübte Daher-Nutzer hilfreich, wenn Schwierigkeiten bei der kontinuierlichen korrekten Positionierung des Cursors bestehen, z. B. bei einer hakeligen Maussteuerung. Auch beim Einstieg in die Blicksteuerung kann der Click Mode eine gute Starthilfe sein.




Ein weiterer Vorteil des Click Mode ist, dass Sie den Cursor jederzeit überall hin bewegen können, ohne dass Dasher auf die Mausbewegungen reagiert.

### Einstellungen


Klicken Sie entweder auf den Button **Preferences** (mit Pref beschriftet)

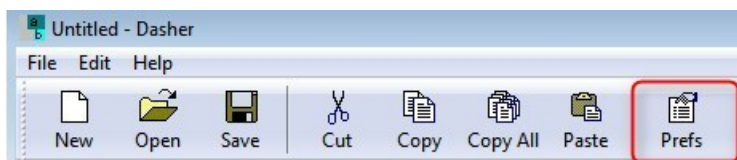

oder klicken Sie im Menü auf **Edit** und dann auf **Preferences ...**

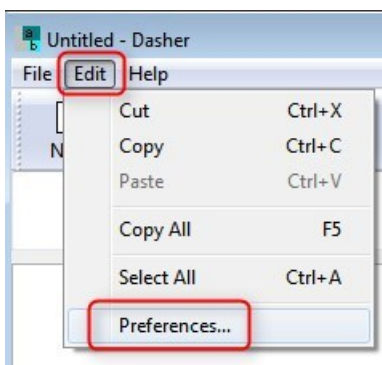


Gehen Sie zur **Registerkarte Controls** und klicken Sie **Click Mode** an.

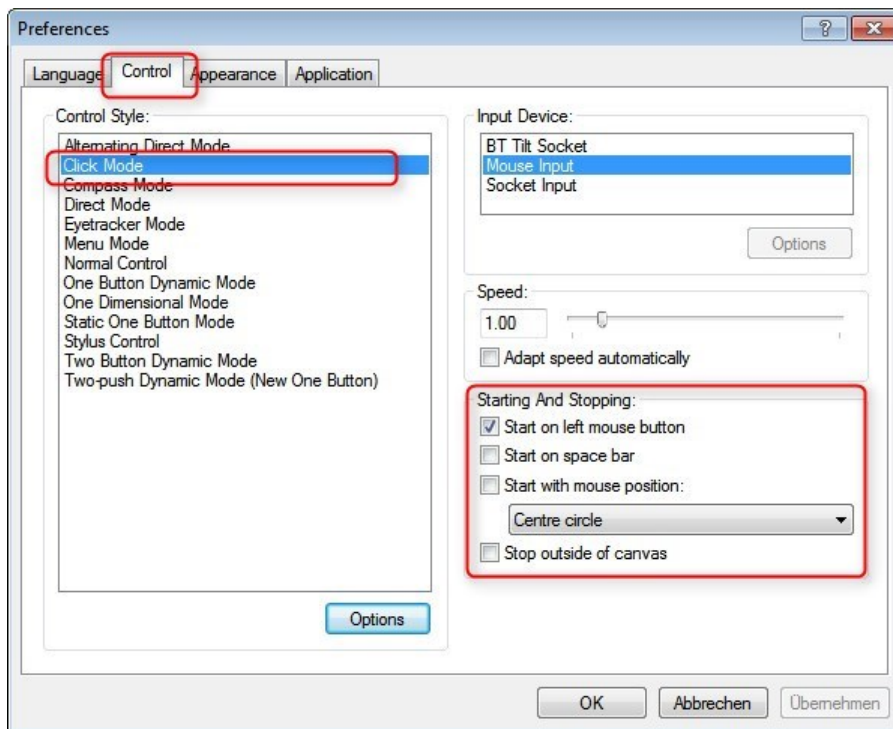

Entfernen Sie alle Häkchen unter Speed bis auf das Häkchen vor **Start on left mouse button**

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Options**.

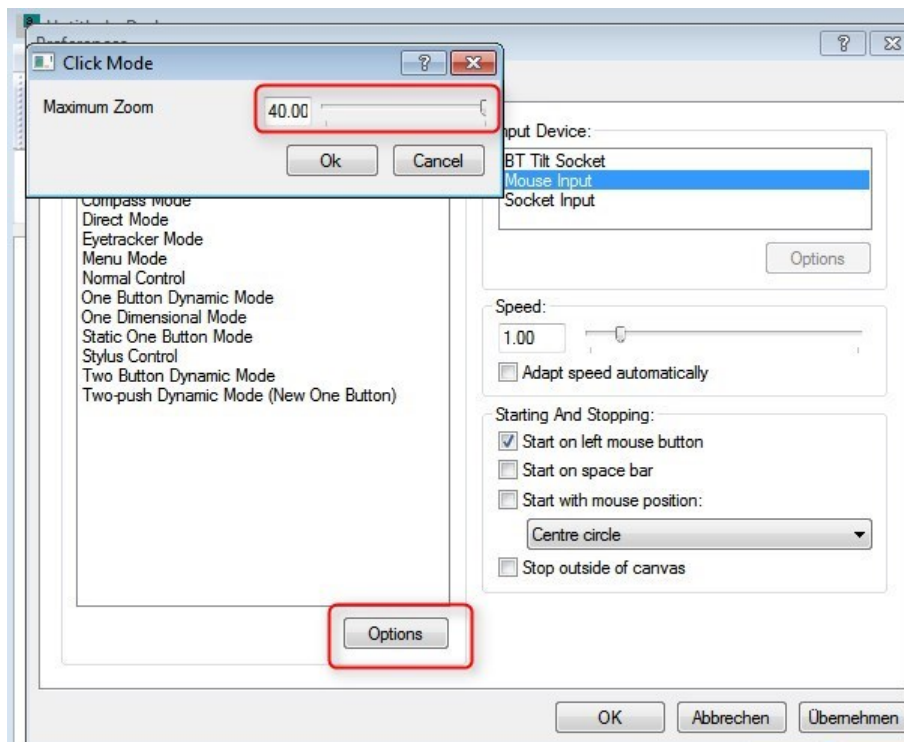

Es öffnet sich ein kleines Fenster, in dem die Schrittweite für den einzelnen Zoomschritt eingestellt werden kann.

Je größer die Zahl, desto stärker zoomt Dasher ein.

**Wählen Sie eine Zahl zwischen 20 und 40.**


(Benutzen Sie den Schieberegler)

Klicken Sie auf **OK**.

## Schreiben im Click Mode

Wenn Sie jetzt den Cursor vor einem Buchstaben positionieren und dann klicken, wird der Bereich rechts davon aufgespreizt (gezoomt).


Um Dasher rückwärts laufen zu lassen (um bereits geschriebenes wieder rückgängig zu machen) klicken Sie in die linke Hälfte des Dasher Bildschirms.

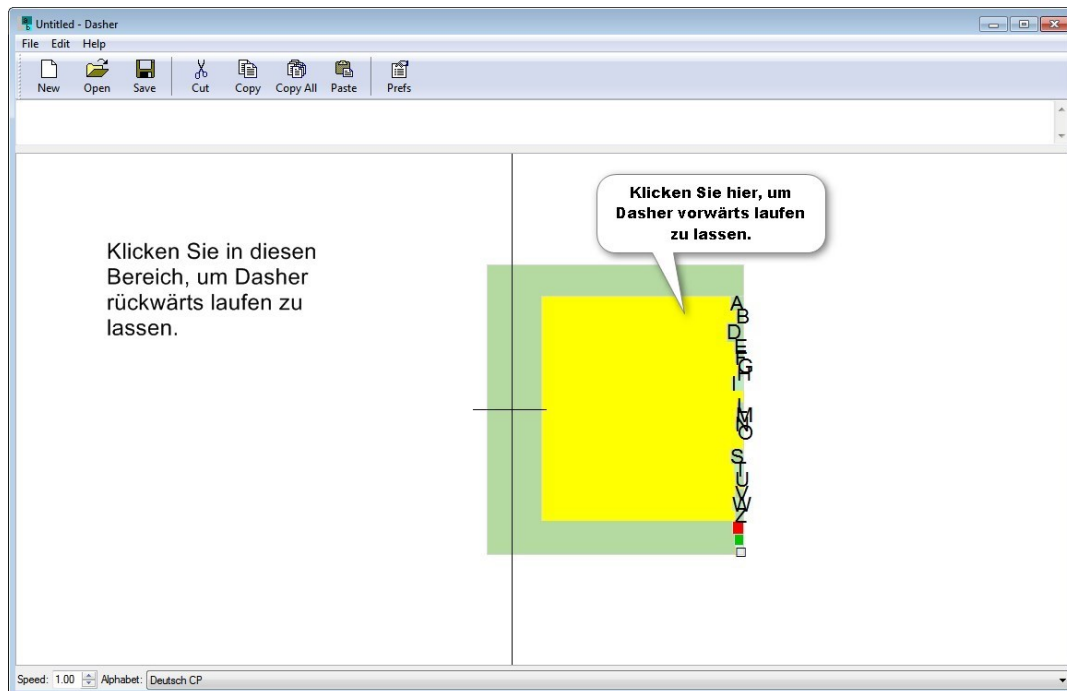

Je näher Sie den Mauszeiger an einen Buchstaben setzen, desto stärker wird gezoomt.


Je weiter der Cursor von einem Buchstaben entfernt ist, desto schwächer wird gezoomt.

Im folgenden Beispiel sind drei Klickpositionen markiert (linkes Bild) und rechts die jeweiligen Ergebnisse gezeigt.

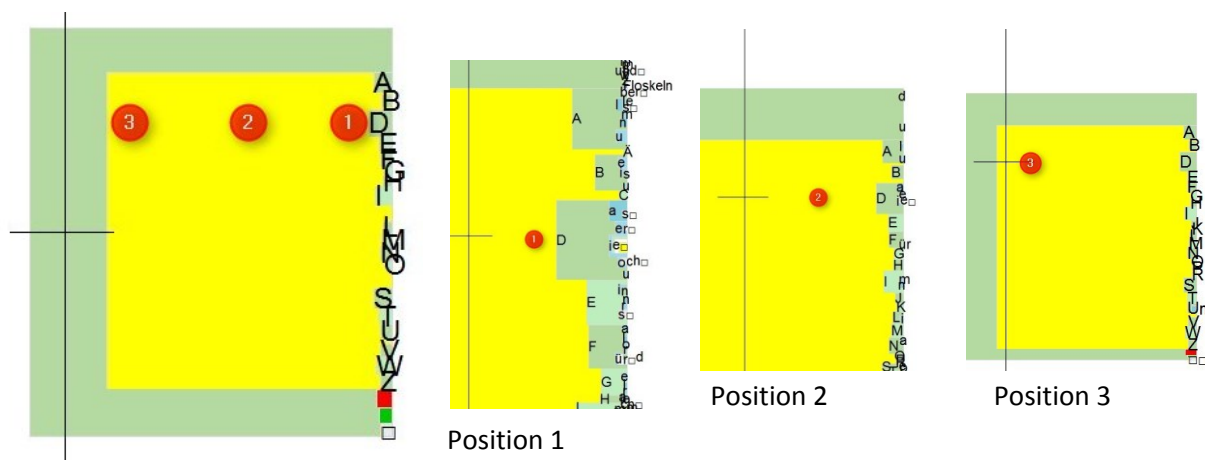


Sie sehen, dass die Position 1 den größten Zomeffekt hat, wahren Position 3 fast nichts bewirkt.

Sie können also durch die Position des Cursors vorm Klicken die Schreibgeschwindigkeit stark beeinflussen.

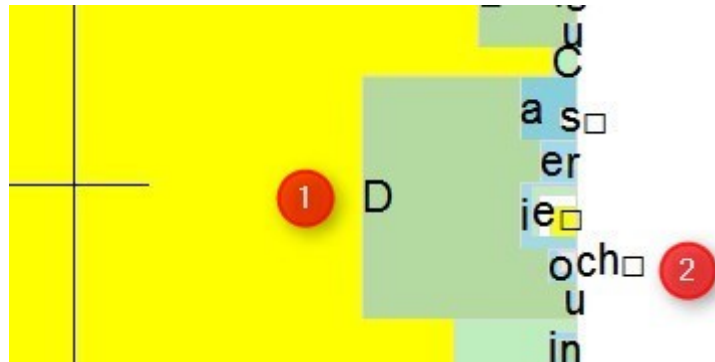

Das erhalten Sie, wenn Sie auf die **Position 1** geklickt haben:

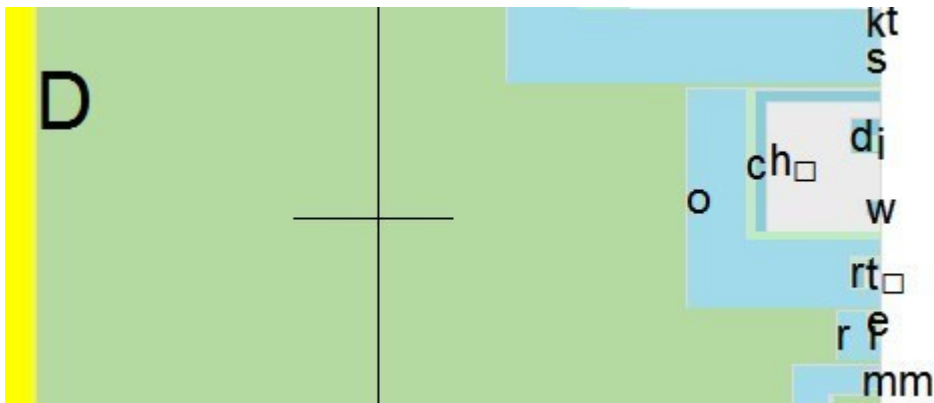

Das erhalten Sie, wenn Sie auf die **Position 2** geklickt haben:

